


Sabina II


Brugsvejledning

Dansk

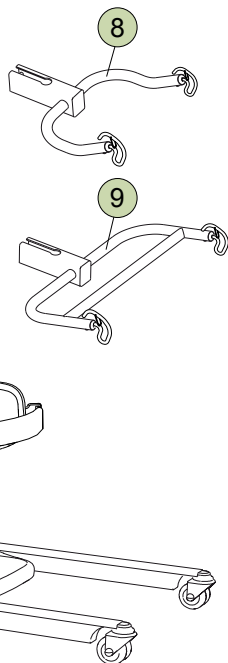

1 Håndbetjening


Sabina II EE Sabina II EM

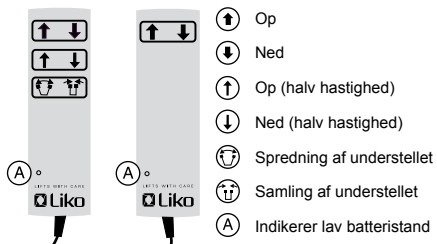


- Op
- Ned
- Op (halv hastighed)
- Ned (halv hastighed)
- Spredning af understellet
- Samling af understellet
- Indikerer lav batteristand

2 Nødstop


Aktivering:

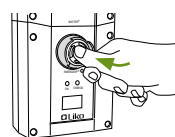

Deaktivering:

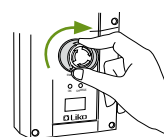


3 Elektrisk nødsænkning/nødhævning

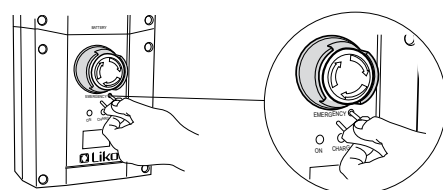

⚠ Genstanden, som anvendes til at trykke ind med, må ikke være for skarp, da dette kan medføre beskadigelse af kontrolboksen!

4 Mekanisk nødsænkning

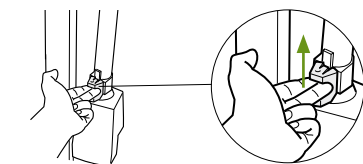


5 Låsning af hjulene



Lås op
Lås


Indstillinger

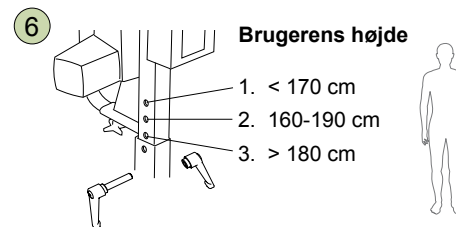

Brugerens højde


- < 170 cm
- 160-190 cm
- > 180 cm

7 Underbensstøtte

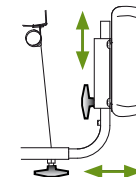


Alternativ anvendelse

8 Løftebøjle 350

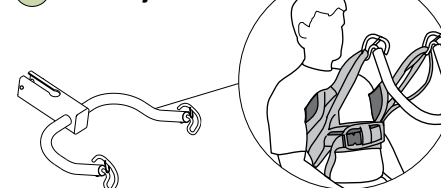

9 Comfortbøjle

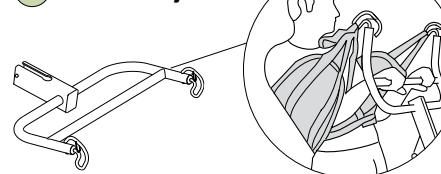

Opladning af batterier



Lad snarest!



Fuldt ladet

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- Nødstopet skal ikke være trykket ind under opladning.

Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

Rengøring

Ved behov, rengør liften ved at aftørre den med en klud, der er fugtet med varmt vand eller sprit.

Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstopet ikke er trykket ind, se ②
- batteriet er opladet
- håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades fra www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løftetilbehør inden anvendelse.
- Planlæg løftet nøje.
- Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestroppeerne er korrekt påhængt løftebøjlen.
- Maks. belastning aktive løft: 200 kg**
Maks. belastning passive løft: 150 kg

For at bibeholde maks. belastning kræves tilbehør der overholder samme belastning eller mere.

VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra www.liko.com.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se