



# Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55

## Brugsanvisning

PR7DK160159-01

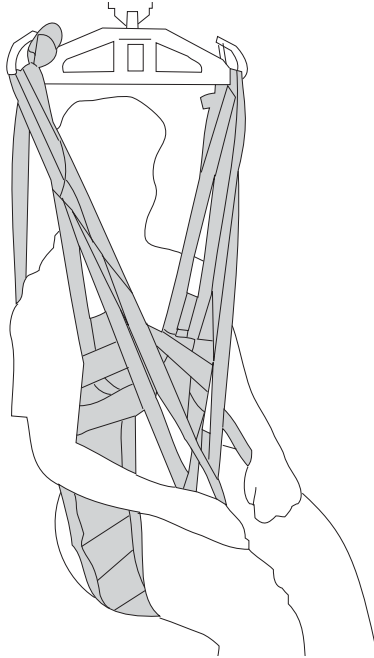

Mod. 50

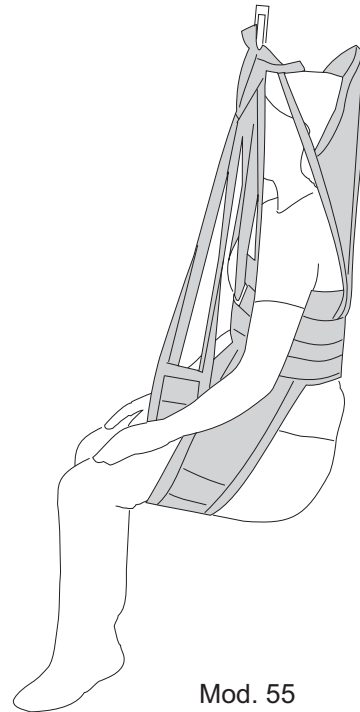

Mod. 55

## Liko Hygiejnevest

Liko Hygiejnevest er et sikkert løftesejl, som kan løse problemer ved løft til og fra toilet.

Hygiejnevesten har nogle unikke funktions- og sikkerhedsmæssige fordele, og derfor fungerer dette sejl ofte i vanskelige tilfælde, hvor ingen andre løsninger har fungeret. Hygiejnevesten har en tætsluttende vest som løfter med en fast støtte om overkroppen. Den store udringning omkring bagdelen giver samtidigt god lads til af- og påklædning under selve løftemomentet ved toiletbesøg.

Hygiejneveste foretrækkes af mange brugere, som værdsætter den oprette og konstante siddestilling. Selv for svært funktionshæmmende personer, som er benamputerede eller har problemer med spasticitet kan Hygiejnevesten være en god løsning. Selv personer med stærkt nedsat kropsstabilitet og lav muskeltonus plejer at kunne klare løft med Liko Hygiejnevest og oplever dette trygt og bekvemt.

Hygiejnevesten er beregnet til løft fra siddende til siddende, den giver en hel opret siddestilling, hvilket letter ved løft til toiletstol og placering i kørestol.

Hygiejnevesten slutter ikke til rundt om enden, hvilket gør den velegnet til anvendelse ved løft fra formstøbte sæder og trange kørestole.

Benstøtterne er afstivende og foret med blødt fløjl.

### Liko Hygiejnevest høj ryg, type 55

Hygiejnevest med høj ryg er et godt valg for den som har behov for støtte, der forhindrer hovedet i at falde bagud. Brugere som har problemer med spasticitet bør afprøve mod. 55.


**△ er en advarselstrekant for steder hvor særlig forsigtighed bør iagttages.**

*I teksten kaldes personen som løftes for brugeren og den som hjælper til for hjælperen.*

**△ Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse.  
Brugsanvisninger kan downloades gratis på [www.liko.com](http://www.liko.com).**



# Liko Hygiejnevest

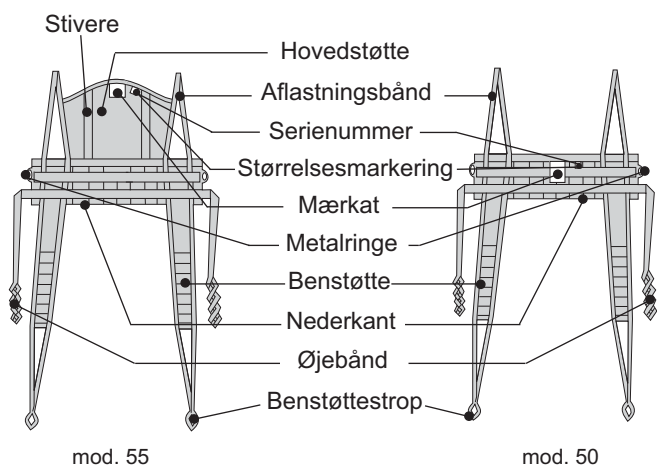


## △ Sikkerhedsforeskrifter!

- Om der er behov for en eller flere hjælpere, skal bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at båndøjerne sidder korrekt på løftebøjlen!
- Løft aldrig en bruger højere end hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger. Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver løftet for højt.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Kontroller at den lift som bruges har en nødsænkning som virker.

## Løft fra kørestol til toilet


Forbered afklædning ved at knappe knapper op og lyne lynlåse ned.

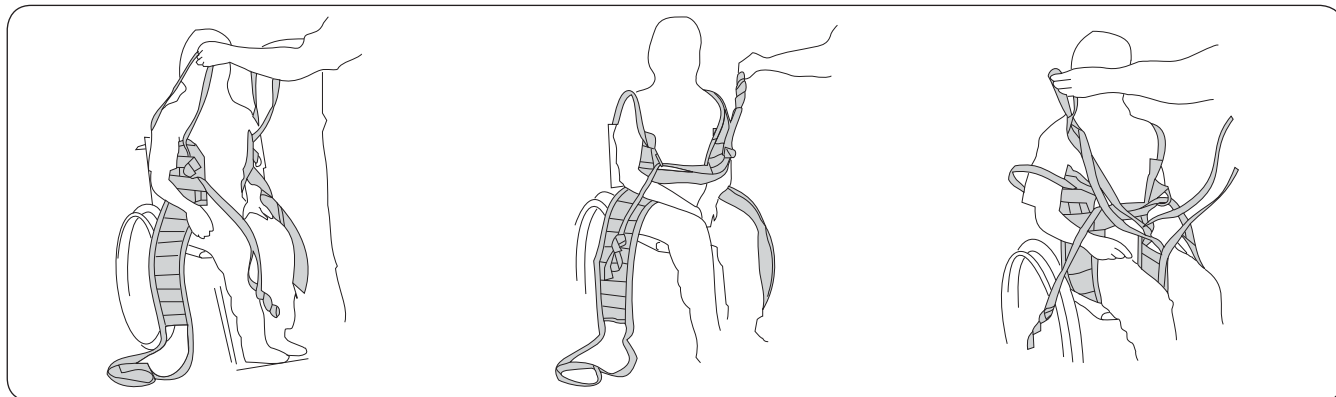

Placer vesten med mærkningen midt bag på ryggen. Stik armene gennem aflastningsbåndene.

Stik højre øjebånd gennem venstre metalring. Stik venstre øjebånd gennem højre metalring.

Placer benstøtterne under de respektive lår og kryds benstøtternes øjebånd.

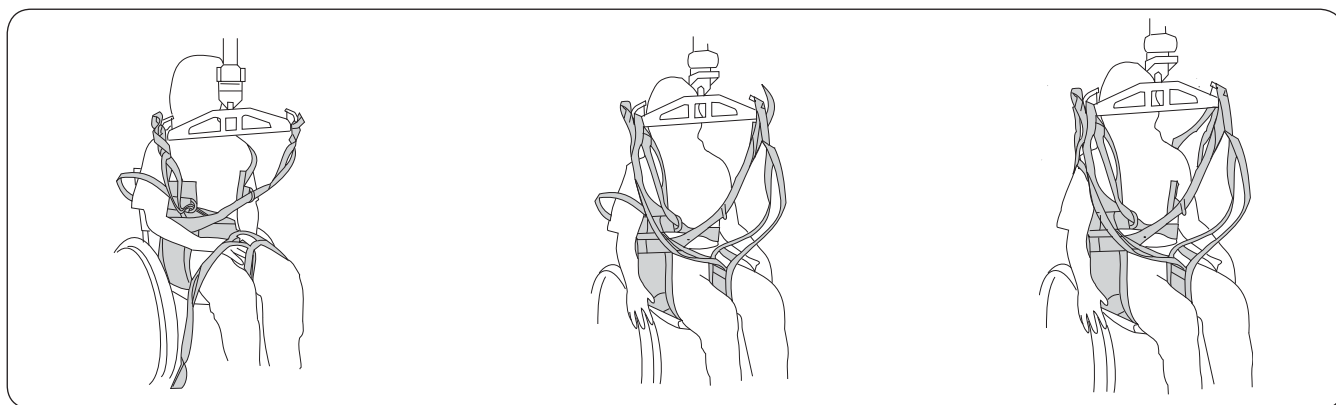

Sæt øjebåndene på løfteåget i et passende øje; se omstående forklaring.


Sæt de krydsede benstøttes øjebånd på løfteåget. To alternativer findes; se omstående forklaring.

Sæt til slut aflastningsbåndene på løfteåget.

## △ Vigtigt!

Hygiejnevesten er beregnet til løft fra siddende til siddende, hvis den anvendes til løft fra liggende, kan dette resultere i en hurtigere nedslidning af aflastningsbåndene.

**Aflastningsbåndene bør altid sættes på løfteåget til sidst.**

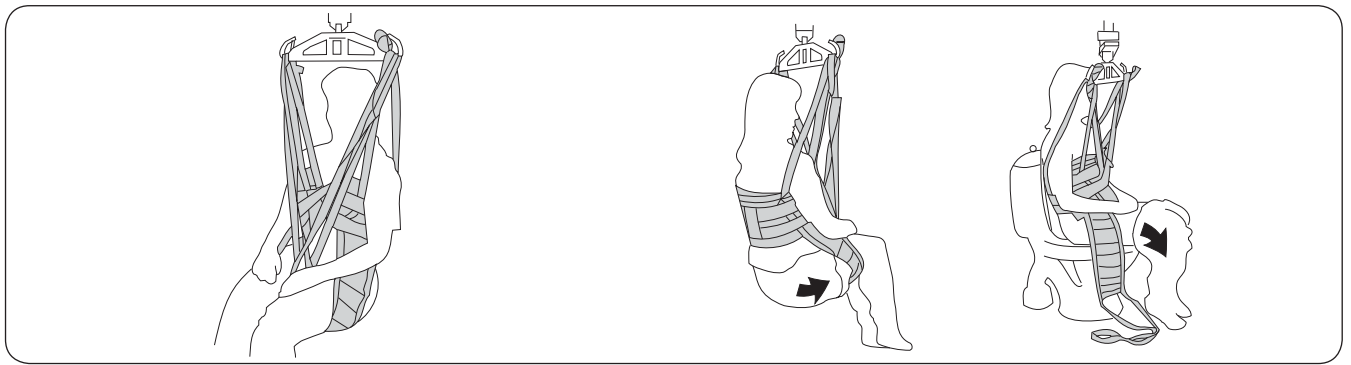

Løft forsigtigt og kontroller at trykket fordeles hensigtsmæssigt mod overkrop og under benene. Se omstående side.

Træk bukserne så meget ned på brugeren som muligt og sænk ned til toiletstolen. Bøj benstøtterne væk og træk tøjet yderligere ned. Vestdelen kan blive siddende som en sikkerhedsvest.

I en del tilfælde kan det være lettest ikke at bøje benstøtterne væk under toiletbesøget, gælder først og fremmest for kvindelige brugere.

## Tilbage fra toiletstol til kørestol

Forneden beskrives to måder at tage tøj på efter afsluttet toiletbesøg. Brugersens tøj og fysiske status afgør valget af metode.

**Alternativ 1:** Benstøtterne udenpå bukserne. Denne metode er velegnet til brugere med bukser uden stræk.




Træk bukserne så højt op i skridtet som muligt.

Placer benstøtterne under benene udenpå bukserne. Placer alle båndøjer på bøjlen (side 2). Løft.

Læg eventuelt en ble på inden bukserne trækkes på plads. Gennemfør forflytningen og placer brugeren i kørestolen.

**Alternativ 2:** Først benstøtter - derefter bukser udenpå. Denne metode er velegnet til brugere med elastiske bukser.

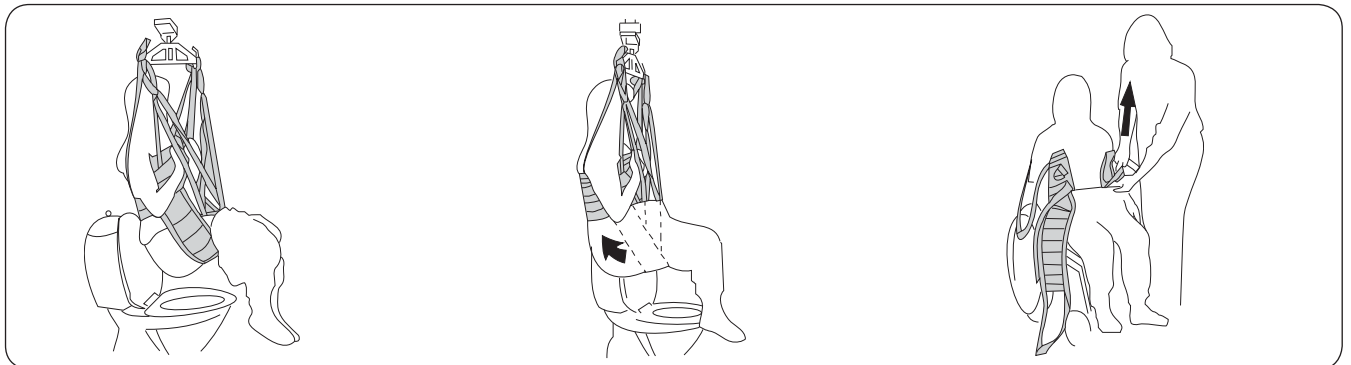

Placer alle båndøjer på bøjlen (side 2). Løft. Eventuel ble lægges på indenfor de krydsede benstøtter.

Træk bukserne op over bagdel og benstøtter når brugeren sidder i sejlet. Flyt til kørestol.


Løft båndøjerne af. Træk forsigtigt benstøtterne ud af bukserne og fjern Hygiejnevsten.

# Gør således når du afprøver en Hygiejnevest

Det er afgørende for Hygiejnevestens funktion at vestens vidde er korrekt i forhold til brugerens omfang rundt om overkroppen. Forskellige bredder på løftebøjlen giver forskellig trykfordeling på brystkassen. Prøv dig frem.

## At vælge størrelse

Når man afprøver korrekt størrelse, skal man kontrollere vestens åbning mellem forkanterne i tiltrukket stand. Det varierer afhængig af størrelse, men bør være ca. 5-30 cm. Jo større størrelse, des større kan åbningen være.

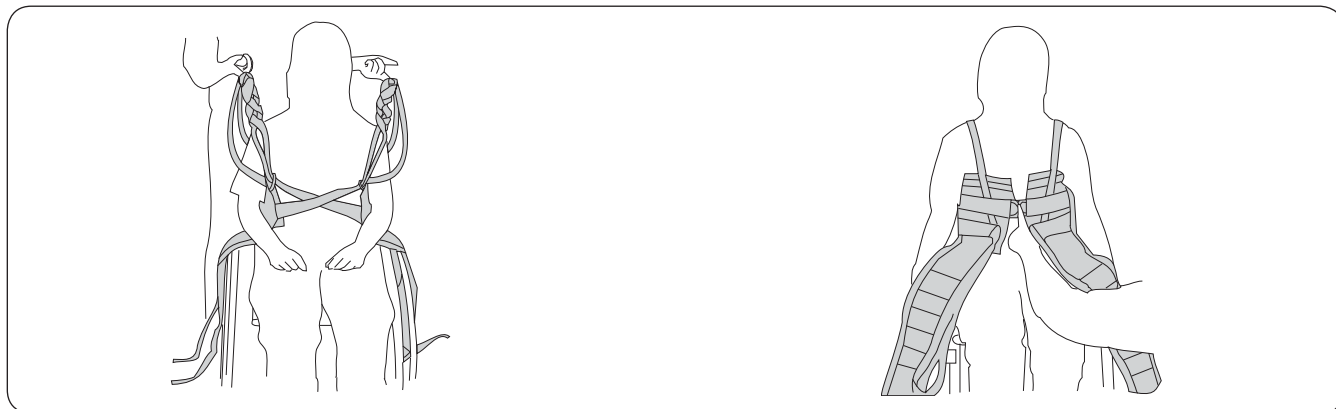

For lille størrelse. Åbningen er for stor og øjebåndene er kortere end aflastningsbåndene i tiltrukket stand.

For stor størrelse. Metalringene mødes og øjebåndene kan ikke trække vesten tilstrækkeligt til.


## Indstilling af øjebånd

Hvilket øje man vælger at sætte på løfteåget afgør hvor meget vesten spænder rundt om brystkassen. Ved at prøveløfte i forskellige øjer samtidigt med aflastningsbåndene, kan man se hvilken position der giver den rette tiltrækning.

Hvis vesten glider op – prøv et øje længere inde alternativt en mindre størrelse.


Hvis vesten spænder for hårdt rundt om brystkassen – prøv et øje længere ude alternativt en større størrelse.

En slankere person skal anvende et øje længere inde end en kraftig person, hvis det er den samme størrelse vest. Ved korrekt indstilling af øjebåndene, har øje- og aflastningsbånd samme spænding under løft.

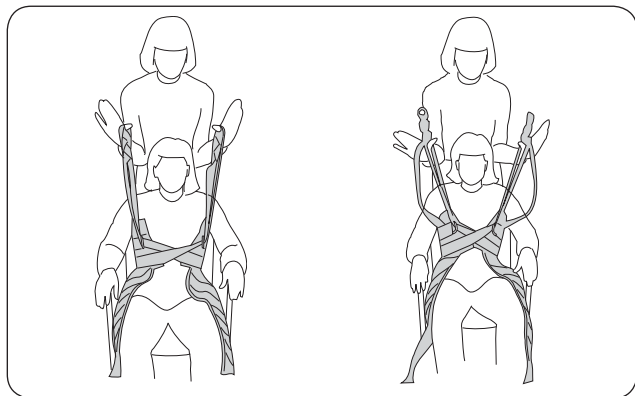

## Afprøvning af indstilling af øjebåndene.

Stå bagved brugeren og hæng aflastningsbåndene rundt om tommelfingrene og løft op ad indtil båndene er ordentligt strakt ud. Ved korrekt forhold mellem øje- og aflastningsbånd har disse samme spænding.

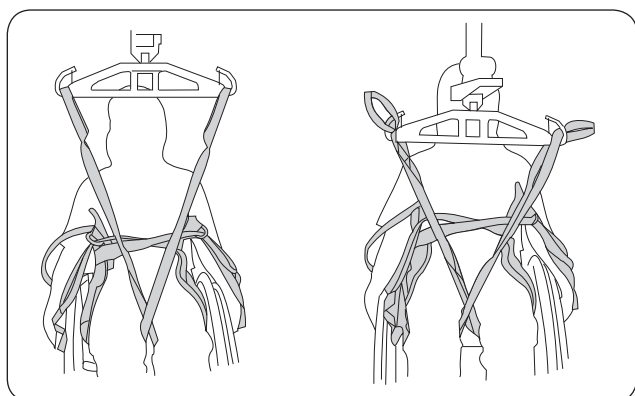

Giver opret siddestilling.  
Passer de fleste.

Til lave brugere.


## Indstilling af benstøtter

I princippet vælger man indstilling efter brugerens længde, ved en lav person sættes benstøttens inderste øje på åget. Dette plejer samtidig at medføre en mere tilbage lænet siddestilling. Prøv dig frem.

**Tips:** I stedet for at bruge det inderste båndøje, anbefales det at binde en knude på benstøttens båndøje.

## Placering af benstøtterne

△ Det er af betydning for siddestillingen, **hvor** under brugerens lår benstøtterne placeres. På en person med meget lav muskeltonus bør de placeres så tæt ved skridtet som muligt for at undgå en nedsunken siddestilling.

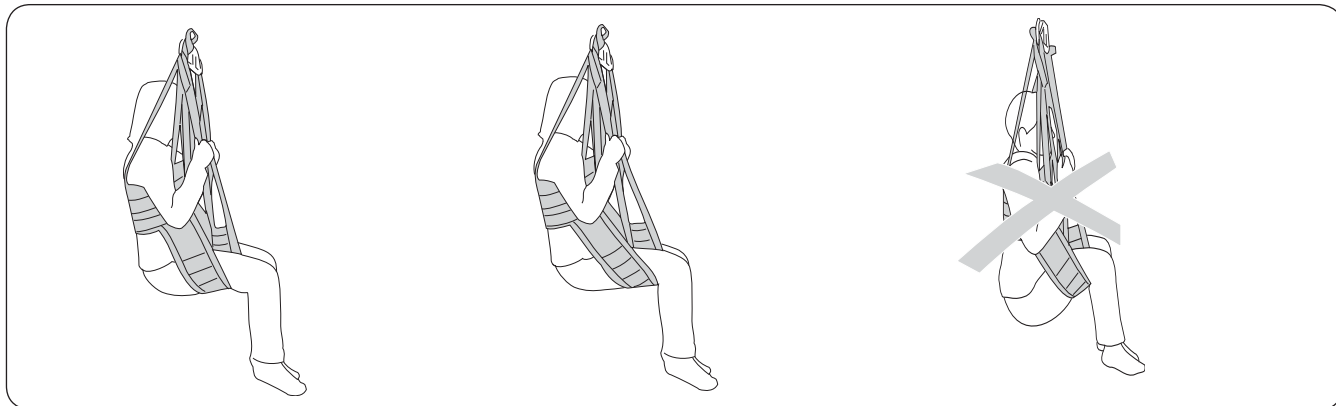

Korrekt placering af benstøtterne for de fleste.

For personer med høj muskeltonus kan det være en fordel at placere benstøtterne nærmest knæhasen.

Hvis siddestillingen virker nedsunken og ubekvem bør benstøtterne placeres nærmere skridtet.

### Tips!



Hvis du har afprøvet en Hygiejvest på en relativt slank person i henhold til anbefalingerne på omstående side, men ikke synes at vest delen trækker tilstrækkeligt, kan du prøve at krydse øjebåndene en gang (ovenfor metalringene) inden øjebåndene sættes på løfteåget.


For bl.a. amputerede kan det være hensigtsmæssigt at stikke benstøttestropperne indenfor de krydsede øjebånd, alternativt igennem metalringene inden de sættes på løfteåget. Dette mindsker risikoen for at benstøtterne skal glide frem på benene.

## Tilbehør

### Polstrede foderaler


Art. nr. 3666021

Som tilbehør findes polstrede foderaler til at sætte på de bageste af aflastningsbåndene.

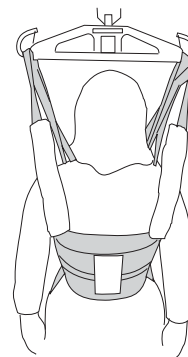


### Øjeclips


Praktisk tilbehør til at afmærke individuelt afprøvet størrelse. Det letter arbejdet for hjælperne at finde det korrekte øje/størrelse hver gang.

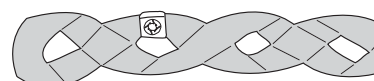

# Oversigt Liko Hygiejnevast, mod. 50, 55

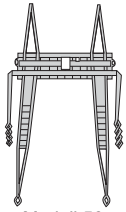

Modell 50

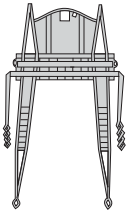


Modell 55

Artikel	Art. nr.	Art. nr.	Størrelse		Brugervægt*
Liko Hygiejnevast	3550812	3555812	XXS	Extra Extra Small	< 20 kg
Liko Hygiejnevast	3550813	3555813	XS	Extra Small	20-40 kg
Liko Hygiejnevast	3550114	3555114	S	Small	30-60 kg
Liko Hygiejnevast	3550115	3555115	M	Medium	50-80 kg
Liko Hygiejnevast	3550116	3555116	L	Large	70-100 kg
Liko Hygiejnevast	3550117	3555117	XL	Extra Large	90-130 kg
Liko Hygiejnevast	3550118	3555118	XXL	Extra Extra Large	> 130 kg
Liko Hygiejnevast	3550119		XXXL	Extra Extra Extra Large	> 150 kg

\*N.B. Den angivne vægt er kun vejledende – afvigelser kan forekomme.

Likos løftesejl er godkendte til 200 kg eller mere, se produktmærkning.

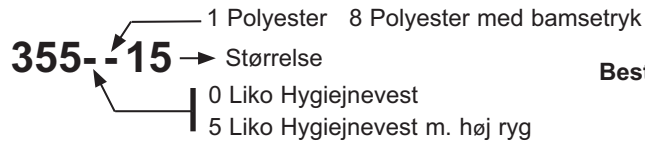

Bestillingseksempel: Art. nr 3550115

Liko Hygiejnevast, polyester, medium.

## Vaskeanvisning:



Tumbling frarådes.

Læs altid vaskeanvisningen på løftesejlets mærkning før vask!

## Anbefalede kombinationer Liko Hygiejnevast og Likos løfteåg:

		Miniåg 220	Smalt åg 350	Universal åg 350	Standard åg 450	Universal åg 450	Universal åg 600	Bredt åg 670	Univ. 670 Twin	Firepunktsbøjle	Krydsbøjle 450	Krydsbøjle 670
Hygiejnevast, XXS	50, 55	1	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast, XS	50, 55	1	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast, S	50, 55	1	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast, M	50	2	1	1	1	1	4	2	2	4	4	4
Hygiejnevast, L	50	2	1	1	1	1	4	2	2	4	4	4
Hygiejnevast, XL	50	3	2	2	1	1	4	2	2	4	4	4
Hygiejnevast, XXL	50	4	3	3	1	1	4	1	1	4	4	4
Hygiejnevast, XXXL	50	4	3	3	1	1	4	1	1	4	4	4
Hygiejnevast m. høj ryg, M	55	2	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast m. høj ryg, L	55	2	1	1	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast m. høj ryg, XL	55	3	2	2	1	1	4	3	3	4	4	4
Hygiejnevast m. høj ryg, XXL	55	3	2	2	1	1	4	3	3	4	4	4

### Forklaring:

- 1 Anbefales
- 2 Acceptabelt
- 3 Frarådes
- 4 U hensigtsmæssigt

I ovenstående tabel findes flere anbefalinger på hver størrelse.

Forskellige bredder på løfteåget giver forskelligt tryk omkring brystkassen, prøv dig frem.

CE Medicinteknisk klasse 1 produkt

Liko Hygiejnevast er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder alle krav ifølge MDD klasse I-produkter, den opfylder alle krav jf. den harmoniserede standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til produktændringer uden forudgående varsel.

Kontakt din Liko repræsentant for opdatering, information og råd.

## ⚠ Viktigt!

Løft og forflytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og liftilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformeret personale bør anvende udstyret.

Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed.

Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet med regelmæssige mellemrum, især efter vask. Se efter slitage eller skader på sømme, stof og øjestropper. Brug ikke beskadede liftilbehør.

Kontakt producenten/leverandøren, hvis du er i tvivl om noget. For kombinationer med lifte af andre fabrikater end Liko kontakt leverandøren.

Liko

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
info@liko.se

Forhandler i Danmark:

A/S A.P. Botved  
Nørrelundvej 5  
2730 Herlev  
Tlf: 80373737  
Fax: 70203737  
info@botved.dk

