



# Liko M220 / Liko M230

## Brugsvejledning

### Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løftetilbehør inden anvendelse.
- Planlæg løftet nøje.
- Inden brugeren løftes fra underlaget, men når løftebåndet er stramt, er det vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt påhæftet løftebøjlen.
- **Maks. belastning: 182 kg**  
For at bibeholde maks. belastning kræves tilbehør der overholder samme belastning eller mere.

### VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades fra [www.liko.com](http://www.liko.com).

### Betjening


#### Løftebevægelse

Op:  
Ned:




#### Mekanisk benspredning: Liko M220

Ud: ↓

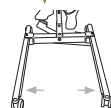

Ind: ↓

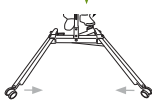

#### Elektrisk benspredning: Liko M230

Ud:

Ind:

### Nødstop

#### Aktivering:



#### Tillbagestilling:




### Nødsænkning

#### Elektrisk:




#### Mekanisk:

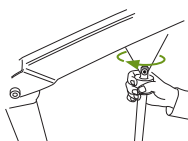

**Genstanden som anvendes til at trykke med må ikke være for spids, da dette kan medføre skade på kontrolboksen!**



### Låsning af hjul

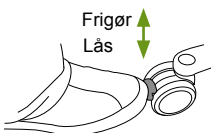

# Liko M220 / Liko M230

## Brugsvejledning


### Afkrogningsbeskyttelse

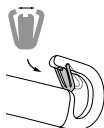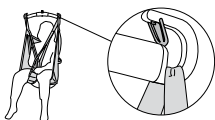



### Opladning af batterier

- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften virker ikke under opladning.
- Nødstoppet skal ikke være trykket ind under opladning.

### Liftens position ved løft

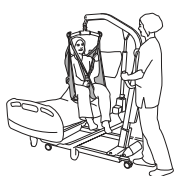

OBS: Placér en pude under brugerens hoved, og husk altid at låse hjulene.

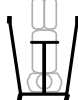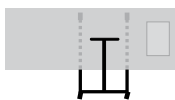

### Enkel fejlfinding

#### Kontroller at:

- nødstoppet ikke er trykket ind
- batteriet er opladt
- håndbetjeningen er korrekt tilsluttet.

### Rengøring

Rengør liften efter behov, ved at tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand eller sprit.

© Copyright Liko AB



 **Liko**

A  Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Fabrikant:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

7DK150503-02