



Likorall 200

Brugsvejledning

Dansk

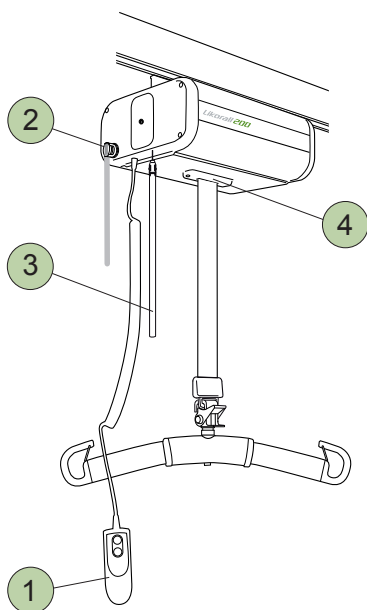


1 Håndbetjening

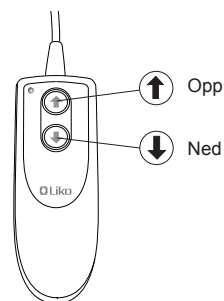

2 Nødstop


Aktivér:

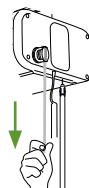


Deaktivér:



3 Elektrisk nødsænkning

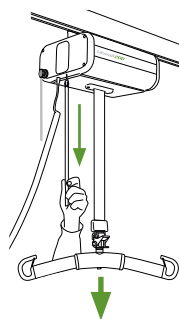


4 Afbryder

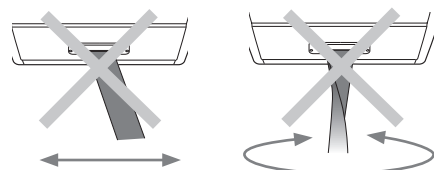

Liften afbrydes ved belastning skråt på løftebåndet eller hvis løftebåndet er vredet.

Opladning af batterier

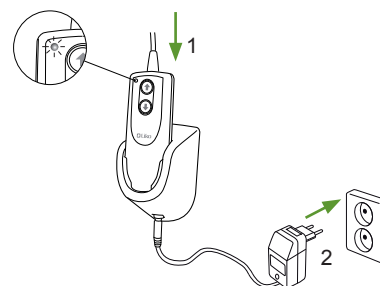


- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften fungerer ikke under opladning.
- **Kontrollér at nødstopet ikke er trykket ind under opladning.**




☀ Gult lys – oplad snarest!

🔔 Lydsignal – oplad snarest!

Skift af løftetilbehør

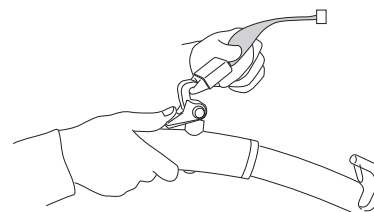

Alternativ anvendelse

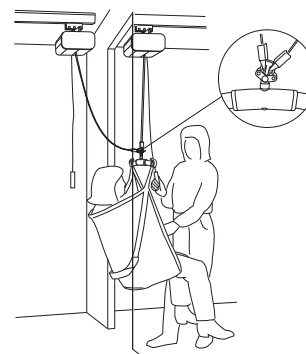

📖 Læs brugsanvisningen for mere information.

Sikkerhedsforskrifter

- Læs brugsanvisningen for både lift og løfte-tilbehøret før anvendelse.
- Planlæg forflytningen nøje inden løftet.
- Inden brugeren liftes fra underlaget, men inden løftesejlets stropper er udstrakte, er det vigtigt at kontrollere at bånddøjerne er korrekt påhængt på løftebøjlen.
- **Maks. last: 200 kg**

For at bibeholde maks. last kræves tilbehør som kan klare samme belastning eller mere.

📖 VIGTIGT!

Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades på www.botved.dk.

Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

Rengøring

Rengør liften efter behov, ved at tørre den med en fugtig klud opvredet med varmt vand eller sprit.

Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstopet ikke er aktiveret, se ②
- batteriet er opladt.

Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades på www.botved.dk.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se