

Brugsanvisning Raised toilet seat King 10LSXX-00

Suft cushion og lid – 10 cm/4

Tilsigtet brug

Det hævede toiletsæde med sidelåsesystem King line er designet til at øge højden på toiletskålen for at lette procedurerne for at sidde ned og rejse sig og fremme uafhængighed og komfort. Modellerne forsynet med den bløde pude giver forbedret sædekomfort, hvilket gør dem mere behagelige at sidde på, desuden giver pudens rynkede overflade mere friktion og stabilitet. Produktet kommer i forskellige konfigurationer, med eller uden en blød pude, og med eller uden låg. Den bløde puder fås i forskellige farver. Låget, bidet og bløde puder fås også separat som tilbehør.

indikationer og kontraindikationer

Produktet af det hævede toiletsæde med sidelåsesystem King line henvender sig til ældre mennesker, kørestolsbrugere, personer med nedsat bevægelighed i lænden, knæet eller hoften og til alle dem, der kan have svært ved at sidde ned og rejse sig fra toilettet. Modellerne giver bløde stødpuder deformeres under siddende, hvilket øger brugerstøtten og giver mulighed for bedre vægtfordelinger. Dette gør disse versioner særligt velegnede, hvis brugeren lider af liggesår eller sygdomme, som kan forårsage dem, såsom diabetes. Evnen til at sidde selvstændigt er påkrævet under brug. brug af produktet i tilfælde af perceptionsforstyrrelser eller balanceproblemer, mens du sidder, anbefales ikke.

sikkerhedsadvarsler og -indikationer.

- den maksimale brugervægt angivet i monteringsvejledningen må ikke overskrides 250 kg
- Før hver brug skal du sørge for, at produktet er i en stabil position på toilettet og korrekt fastgjort på det med det medfølgende låsesystem.
- sørg for, at den bløde pude omslutter sædet korrekt
- Før du påfører den bløde pude, skal du sørge for, at sædet er rent og tørt
- under monteringen skal du nøje overholde det, der er vist i brugervejledningen
- Undlad at ændre produktet og dets komponenter på nogen måde
- brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ændret på nogen måde
- vær sikker på, at produktets højde er sådan, at det gør det nemt og sikkert for brugeren
- Under brug, undgå stillinger, der holder kropsvægten for meget fremad. forkerte positioner kan føre til ustabilitet af produktet.
- produktet og tilbehøret må ikke opbevares udendørs

vedligeholdelse info

Produktvedligeholdelse består af rengørings- og sanitetsprocedurer. For at garantere sikker brug og en tilstrækkelig hygiejnestandard bør brugeren udføre disse procedurer før hver brug. Brugeren skal sikre sig den strukturelle integritet af enheden og dens komponenter, og skruernes tilspænding skal kontrolleres. Følg nedenstående trin for rengøring og sanitetsprocedurer

- Handsker skal bæres.
- Fjern det tydelige snavs, før du fortsætter, med den mest nøjagtige desinfektion.
- brug vand eller ikke-aggressiv rengøringsmiddel til rengøringen.
- aftør med en tør og ren klud

Alternativt kan produktet rengøres i opvaskemaskiner ved maksimal temperatur.(65 grader) Den bløde pude skal rengøres i hånden.

krav til genbrug

produktet er egnet til genbrug af andre brugere. før det genbruges af andre, skal produktet være korrekt rengjort og desinficeret. Inden produktet overdrages til andre, skal produktet kontrolleres af forhandleren.

korrekt bortskaffelsesprocedure

bortskaf ikke produktet i det almindelige husholdningsaffald. Spørg din lokale myndighed på forhånd om den korrekte og miljøvenlige måde at bortskaffe det på

Hændelsesrapportering

hvis der er en alvorlig hændelse, der involverer denne enhed, skal du kontakte producenten af produktet på info@botved.dk

