

Produktbeskrivelse

Liko Universalsejl er en standardmodel, som er konstrueret til at tilpasse sig til brugeren uden individuelle indstillinger, og som er én af vores mest anvendte løftesejl.

Universalsejlet giver en god siddestilling med støtte i hele ryggen op til nakken. Brugers arme holdes inden for løftesejlet. Et korrekt afprøvet og omhyggeligt påsat Universalsejl giver brugeren en utrolig god tryghedsfølelse og høj komfort.

Størrelser

Universalsejlet findes i flere forskellige størrelser. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå en optimal komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for udglidning, hvorimod et for lille løftesejl kan blive for smalt om bagdelen og give ubehag.

Til større størrelser kan en kombination med Liko Universalbøjle 670 Twin være en god løsning.

Materiale

Universalsejlet fås i forskellige materialer. Eftersom Universalsejlet som regel ikke efterlades under brugeren efter afsluttet løft, anbefaler vi modellen i polyester. Dette materiale er meget slidstærkt og har en lav friktion, hvilket betyder, at løftesejlet er nemt at påsætte og fjerne.

Universalsejlet fås også i netpolyester. Dette materiale anbefales i de situationer, hvor løftesejlet efterlades under brugeren efter afsluttet løft eller i de situationer, hvor man blot foretrækker et luftigere alternativ.

Til bad og brusebad findes en model i plastbehandlet netmateriale, hvor vandet kan trænge igennem, og som kan tørres af. Materialet tørrer hurtigere og føles ikke koldt på samme måde, som gennemvædet tekstil gør.

Universalsejlets løftebånd er altid fremstillet af slidstærkt polyester og giver en optimal sikkerhed.

Benstøtte

Universalsejlet fås med benstøtte i flere forskellige modeller. Den mest anvendte benstøtte har afstivede indlæg. Afstivningen giver høj komfort, udjævner trykket og forhindrer, at løftesejlet foldes under lårene.

Der fås også en benstøtte med blød polstring (syntetisk fåreskind). Denne model er især velegnet til trykfølsomme brugere.

Liko Universalsejl med ekstra løftehøjde, model 02

Universalsejl model 02 anbefales ved løft, hvor det er svært at opnå en tilstrækkelig løftehøjde. Ophængningsløkkerne er minimerede, og siddestillingen er lidt mere tilbagelænet sammenlignet med model 00.

△ er en advarselstrekant i situationer, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.

I teksten omtales personen, der bliver løftet, som bruger, og personen, der hjælper til, omtales som medhjælper.

Læs brugsanvisningen om løftesejlet og den lift før brug. Brugsanvisningerne kan downloades gratis fra www.liko.com.

Sikkerhedsanvisninger

OBS!

- Hvorvidt det er nødvendigt med én eller flere medhjælpere, skal bedømmes ud fra den enkelte situation af den ansvarlige medarbejder i jeres virksomhed.
- Kontrollér, at løftesejlet er af den rigtige model, størrelse, materiale og funktion i forhold til brugerens behov.
- Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager skal der anvendes individuelle løftesejl.
- Planlæg løftet, før det foretages, så det sker så sikkert og problemfrit som muligt.
- Før løft kontrollér da, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.
- På trods af, at Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Det er vigtigt, inden brugeren løftes fra underlaget - men når båndene er strakte - at kontrollere, at båndøjerne er hægtet korrekt på løftebøjlen.
- Kontrollér, at brugeren sidder sikkert i løftesejlet, inden løftet foretages.
- Løft aldrig en bruger højere fra underlaget end nødvendigt.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Kontrollér, at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Arbejd altid ergonomisk.

Medicinteknisk klasse I produkt

Liko Universalsejl er testet af et akkrediteret testinstitut og opfylder alle krav iht. det medicintekniske direktiv om klasse I produkter. Det opfylder også kravene iht. EN ISO 10535.

Liko er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001.

Design and Quality by Liko in Sweden

Likos produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os retten til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din Liko/Hill-Rom repræsentant for oplysninger, råd og eventuelle opdateringer.

VIGTIGT!

Løft og flytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisning om liften og lifttilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Det er kun personer, der er velinformerede, som bør anvende udstyret. Kontrollér, at lifttilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen.

Eftersyn og vedligeholdelse

Kontrollér altid løftesejlet før det anvendes. Kontrollér følgende med henblik på slidskader og slitage:

- Stof
- Bånd
- Sømme
- Ophængningsløkker

Anvend ikke beskadiget lifttilbehør.

Kontakt fabrikanten eller leverandøren i tilfælde af tvivl eller spørgsmål.

Vaskeanvisning: Se løftesejlets mærkning.


Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 1-5 år ved almindelig anvendelse. Levetiden afhænger af materiale, brugsfrekvens, vaskeprocedure samt belastning.

Periodisk eftersyn



Et periodisk eftersyn af produktet skal udføres mindst hver 6. måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendig, såfremt produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se Likos protokol om periodisk eftersyn til det respektive produkt.

Definitioner

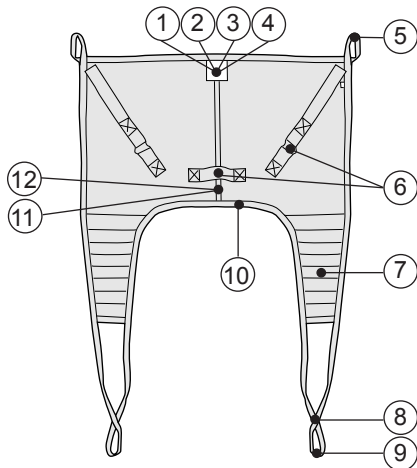



1. Produktmærkat
2. Serienummer
3. Mærkat: Periodisk eftersyn
4. Mærkat: Individuel mærkning (Belongs to)
5. Øverste båndløkke
6. Håndtag
7. Benstøtte
8. Afkortningsstykke
9. Ydre benstøtteløkke
10. Nederste kant
11. Midtermarkering
12. Størrelsesmarkering

Løft fra siddende

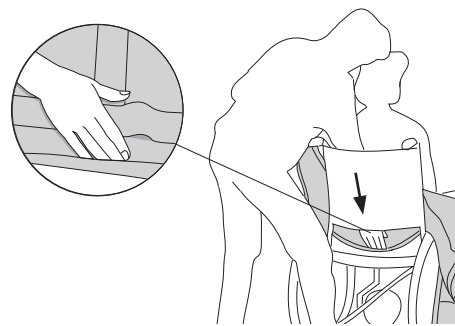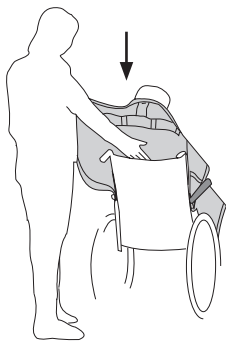

Placér løftesejlet bag brugerens ryg med produktmærkatet udvendigt. Fold den nederste kant på løftesejlet omkring dine fingerspidser for nemmere at føre løftesejlet på plads.

Tryk ved hjælp af håndfladen løftesejlets nederste kant ned til brugerens haleben - **dette er meget vigtigt**.
Tips: En korrekt placering opnås nemmere, hvis brugeren lænes/læner sig lidt fremad.

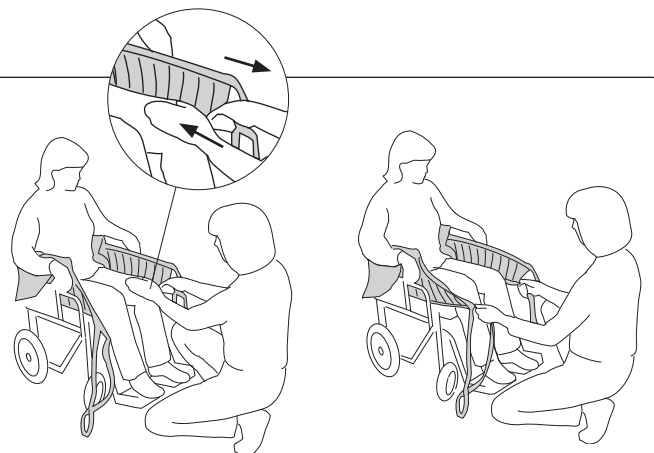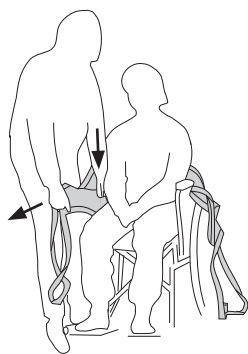

Træk løftesejlets benstøtte ud langs brugerens lår. Placér din håndflade mellem krop og løftesejl, og før benstøttens nederste kantbånd ned mod sædet. Træk samtidig benstøtten fremad med den anden hånd for at strække den ud.

Træk ud i benstøtten, så eventuelle folder bagpå rettes ud. Kontrollér, at begge benstøtter når lige langt frem.
Tips: Med en let modstand under knæskallen bliver det nemmere at trække benstøtten frem.



Indfør benstøtten under det respektive lår. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når godt rundt om benet. **Tips:** Påsætning af benstøtter er nemmere, hvis brugerens ben aflastes fra sædet. Det kan ske ved at placere brugerens fødder på fodstøtten eller på dit eget ben, som vist i illustrationen.

Forbered påsætningen af benstøtterne. Den mest anvendte fremgangsmetode til påsætning af løftesejlet er med krydsede benstøtter. På side 7 illustreres andre fremgangsmetoder til påsætning af benstøtterne.




Tips: Kontrollér, at alle ophængningsløkkerne er lige lange, dvs. at de når lige højt, når de strækkes før løftet. Justér løftesejlets placering, såfremt de ikke når lige højt.

Hægt først de øverste båndløgger på løftebøjlen og herefter løkkerne på benstøtterne. Løft brugeren op.

Løft til siddende

Ved placering i stol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i stolen for at sidde behageligt. Det kan gøres på flere måder.

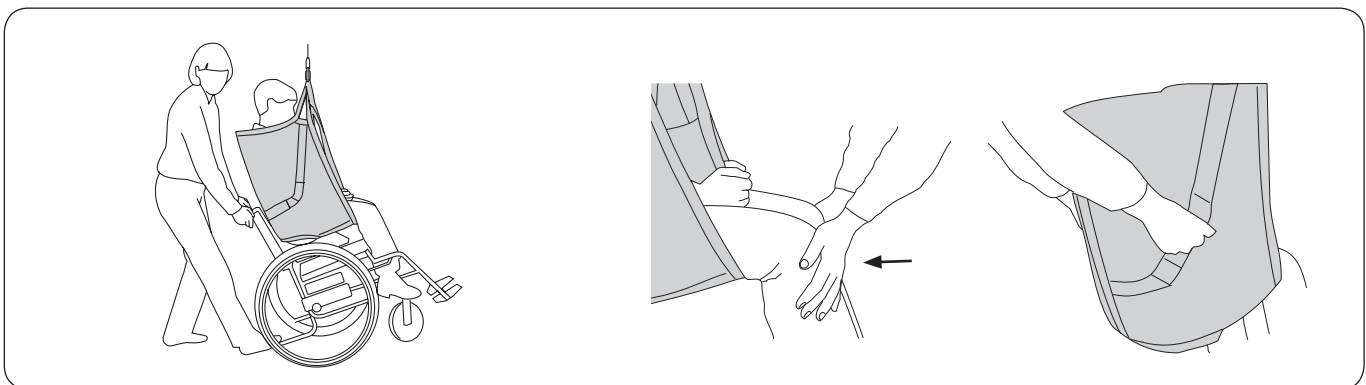


Ved placering i kørestolen: Vip stolen bagud under nedsænkningen. Lad bagdelen glide ned langs rygstøtten det sidste stykke. Kontrollér kørestolens placering med foden på tipstøtten.

Alternativ: Tryk let på brugerens knæ ved nedsænkningen, så bagdelen føres ind mod rygstøtten. Hvis der er håndtag på løftesejlet, er det muligt at føre vha. disse.

△ Løft ikke i håndtagene! For stor belastning på håndtagene kan resultere i, at løftesejlet brister.

Sådan fjernes løftesejlet i stol/kørestol

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet løft. Såfremt det ønskes at efterlade løftesejlet i stolen efter afsluttet løft, anbefaler vi et løftesejl i netpolyester.

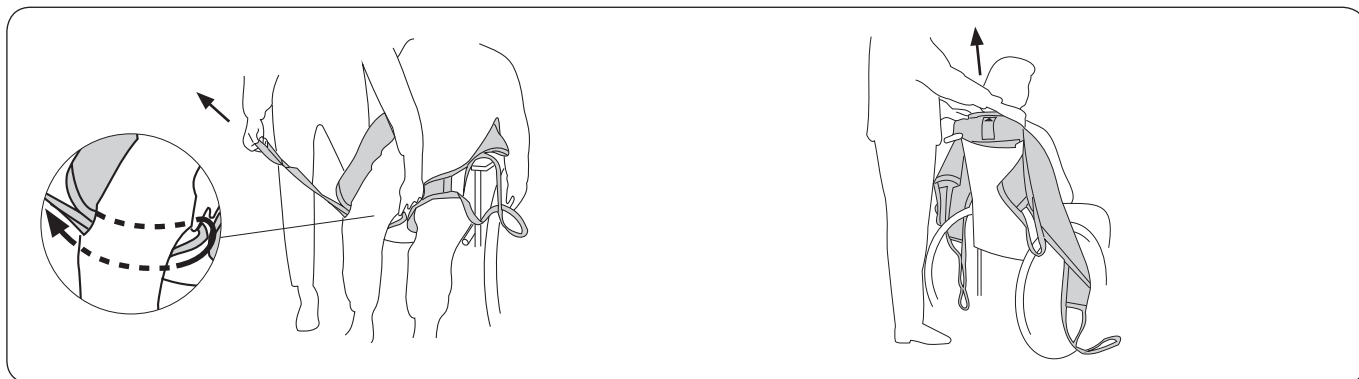

Fjern forsigtigt benstøtterne. Dette foretages mest skånsomt ved at trække benstøtteløkkerne ud under stoffet.


Fjern løftesejlet ved at forsigtigt trække det opad.

Løft fra seng

Vi anbefaler, at løftesejlet påsættes, når brugeren ligger vandret, da det er den nemmeste fremgangsmetode. I visse tilfælde, fx hvis brugeren ikke kan ligge vandret, kan løftesejlet påsættes, når brugeren sidder op i sengen. (Se **Andre fremgangsmetoder til påhægtning af løftesejlet** herunder).

Ved løft fra liggende stilling uden mulighed for at hæve hovedgærdet på sengen, anbefales Liko Soft Originalsejl Høj model 26, eller Liko Originalsejl Høj Ryg model 20, 21, som alle giver hovedstøtte.

Vær opmærksom på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævning og sænkning.

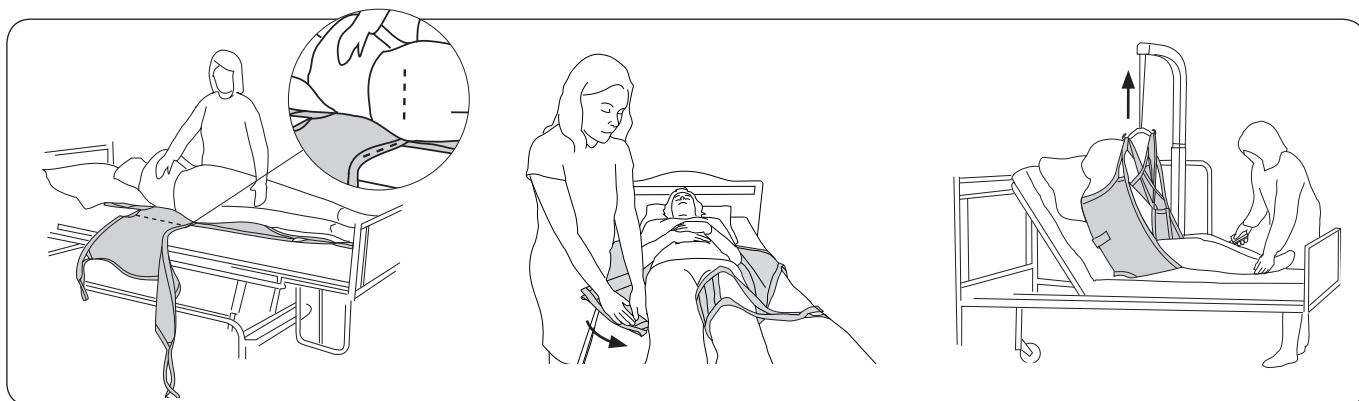

Vend brugeren mod dig for at forebygge risikoen for fald fra sengen. Placér løftesejlets kant ind under brugeren med den nederste kant **i niveau med halebenet**. Læg løftesejlet i en fold, så "midtermarkeringen" er ud for brugerens ryggrad, når brugeren forsigtigt lænes tilbage. Træk forsigtigt løftesejlet ud på den anden side.

Før benstøtten ind under det respektive lår. Dette foretages nemmest ved at trykke benstøtten ned mod madrassen samtidigt med, at det føres ind under låret. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når helt rundt om benet. Benstøtten kan påhægtes på forskellige måder. Se side 7 for yderligere oplysninger.

Hæv sengens hovedgærde. Hægt først de øverste båndløg på løftebøjlen og herefter benstøtteløkkerne. Løft brugeren op.


Andre fremgangsmetoder til påhægtning af løftesejlet: Hæv sengens hovedgærde bag brugeren. Læg løftesejlet på sengen med produktmærkatet ned mod madrassen. Før løftesejlet ned bag brugerens ryg, til den nederste kant **når ned til halebenet**. **Tips!** Påsætningen sker nemmest, hvis brugeren lænes/læner sig fremad.

Løft til seng

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet løft. Såfremt det ønskes at efterlade løftesejlet i sengen efter afsluttet løft, anbefaler vi et løftesejl i netpolyester.

Vær opmærksom på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævning og sænkning.

Sådan fjernes et løftesejl i siddende stilling i seng

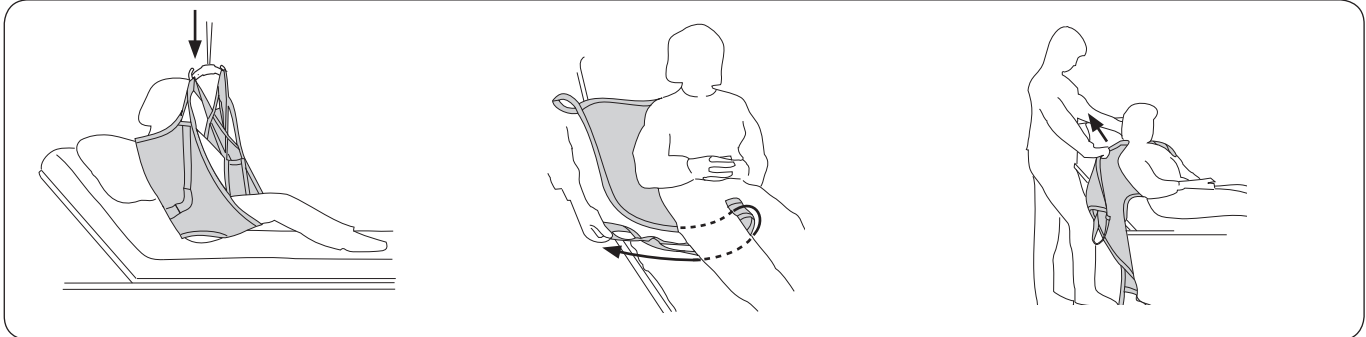


Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen.

Fjern benstøtterne ved at trække benstøtteløkkerne ud under stoffet.
Tips: Dette er nemmest, hvis brugerens ben er bøjede.


Fjern løftesejlet ved at forsigtigt trække det opad.

Sådan fjernes et løftesejl ved liggende stilling i seng

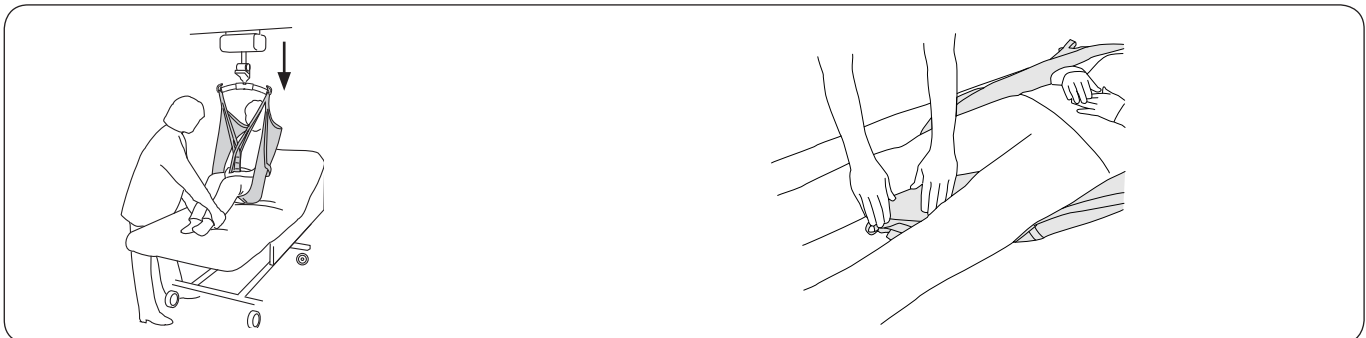

Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen. Sænk herefter hovedgærdet.

Placér benstøtteløkkerne under benstøtterne mellem brugerens ben.

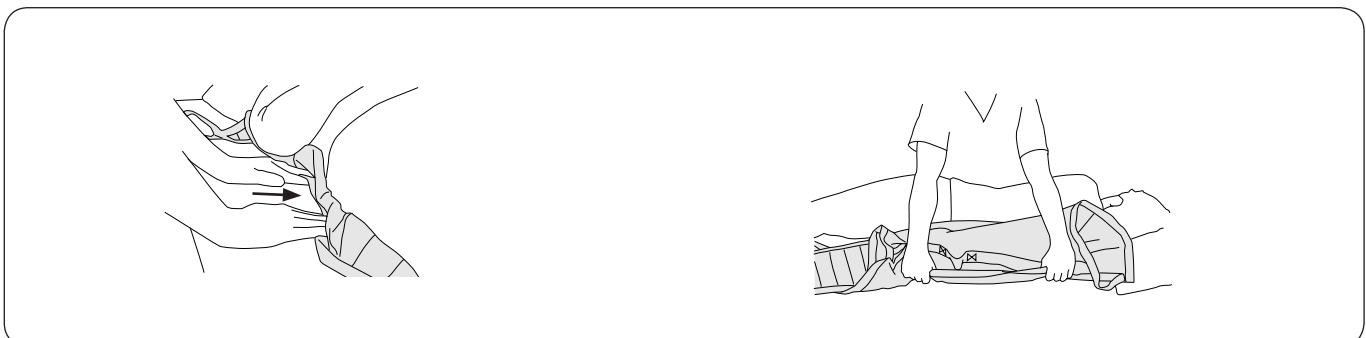

Tag fat i kanten på løftesejlet. Pres løftesejlet sammen. Tryk løftesejlet ned mod madrassen og ind under brugeren.

Vend brugeren forsigtigt på siden. Tag fat nederst på løftesejlet, og træk det forsigtigt ud.

Løft til/fra toilet


For løft til/fra toilet med Universalsejlet iht. "trussetricket", se den separate anvisning.

I Likos sortiment findes der flere andre løftesejle, som kan anvendes til løft til/fra toilet, fx Liko Toiletsejl og Liko Hygiejnevest.

Afprøvningsråd

Forskellige måder at påhægte benstøtterne

Inden valg af montering skal der altid foretages en individuel vurdering for at forudse eventuelle risici.

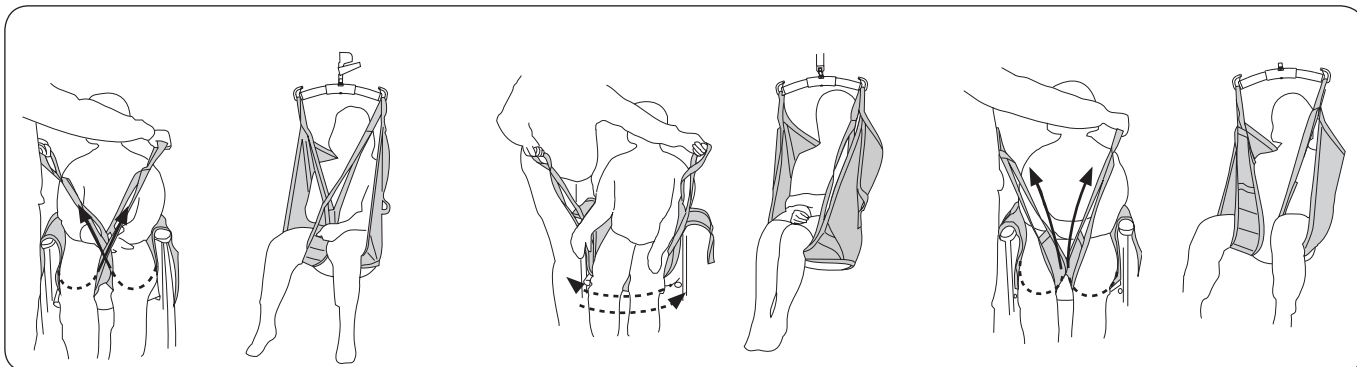

Med krydsede benstøtter.

Den mest anvendte måde til påhængning af løftesejlet. Den ene benstøtteløkke trækkes igennem den anden, inden løkkerne hægtes på løftebøjlen.

Omkring begge lårben.


Dette kan være en god fremgangsmetode fx ved løft af brugere med amputerede ben. **Tips:** For at undgå, at brugerens siddestilling skal blive for tilbagelænet, kan man montere forlængerstropper på benstøtteløkkerne.

Hvert ben hægtes hver for sig på løftebøjlen.

Dette kan være en god fremgangsmetode ved løft af brugere med særlig følsomt underliv.

Δ Øget risiko for udglidning.

Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet, - hvad kan det skyldes?

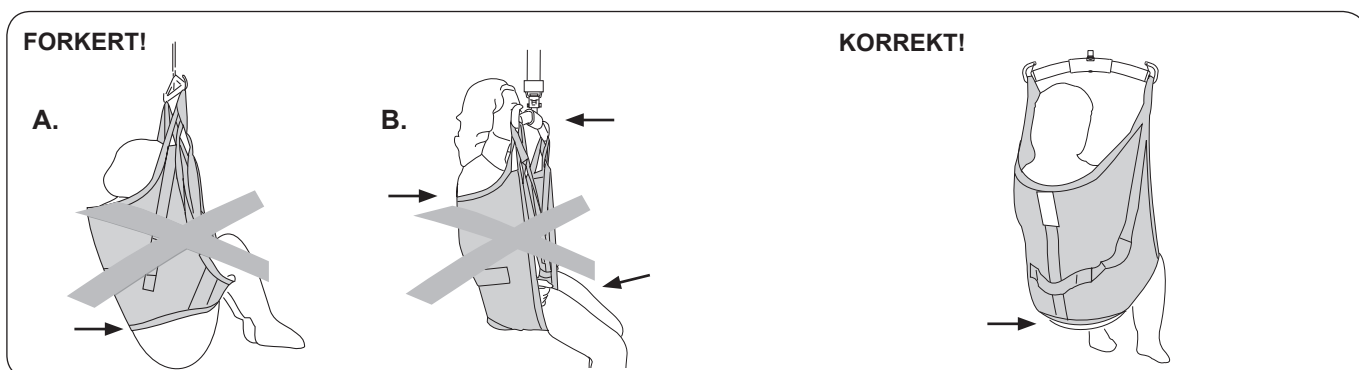

A. Risiko for udglidning. Bagdelen hænger ned. Løftesejlets størrelse kan være for stor. Det kan også skyldes, at løftesejlet ikke er trukket tilstrækkelig langt nok ned i ryggen ved påsætningen.

Kontrollér, inden løftet påbegyndes, at den nederste kant er udstrakt, og at stoffet når helt rundt om benene.

B. En for lille størrelse kan medføre, at benstøtterne skærer ind i skridtet og giver ubehag, eller løftebøjlen kommer for tæt på ansigtet og/eller, at ryggen støttes for lavt.

Løftesejlets nederste kant er i højde med halebenet. Benstøtterne ligger godt under benene.

Afkortningsstykke


I visse tilfælde kan det være en fordel at afkorte benstøtteløkkerne, så brugeren sidder godt i Universalsejlet. Afkortningsstykket kan justeres ved brug for at indstille en passende længde, men ved langvarigt brug af afkortningsstykket, kan sømmen blive beskadiget. Hvis man ønsker at afkorte benstøtteløkkerne til langtidsbrug, anbefaler vi i stedet, at man slår en knude på benstøtternes løkker, hvilket afkorter dem ca. 10 cm. Det er da den yderste benstøtteløkke som skal hægtes på løftebøjlen.

Oversigt over Liko Universalsejl, model 00 og 02

Vare	Varenr.	Størrelse	Personvægt ¹	Max. belastning ²
Liko Universalsejl	3500--4	S	35 - 55 kg	200 kg
Liko Universalsejl	3500--1	M-Slim (lille voksen)	45 - 70 kg	200 kg
Liko Universalsejl	3500--5	M	60 - 90 kg	200 kg
Liko Universalsejl	3500--6	L	80 - 120 kg	200 kg
Liko Universalsejl	3500--7	XL	110 - kg	300 kg
Liko Universalsejl med ekstra løftehøjde	3502--5	M	60 - 90 kg	200 kg
Liko Universalsejl med ekstra løftehøjde	3502--6	L	80 - 120 kg	200 kg

¹ Den angivne personvægt er kun vejledende – afvigelser forekommer.

² For at bibeholde maks. belastningen kræves en lift/tilbehør, der er beregnet til samme belastning eller større.

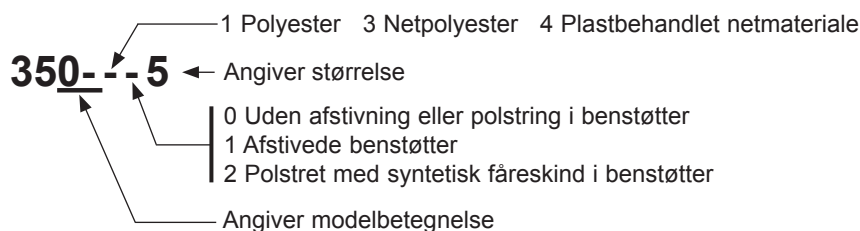

Kombinationer

Anbefalede kombinationer med Liko Universalsejl og Likos løftebøjler:

	Minibøjle 220	Smal 350	Universal 350	Standard 450	Universal 450	Universal 600	Bred 670	Univ. 670 Twin	Firepunktsbøjle	Krydsbøjle 450	Krydsbøjle 670	Sidebøjler + Smal 350	Univ. sidebøjler + Universal 350	Sidebøjler + Standard 450	Univ. sidebøjler + Universal 450
Universalsejl, S	3	2	2	1	1	3	2	2	1*	1	2	3	2	2	2
Universalsejl, M-Slim	3	2	2	1	1	3	1	1	1*	1	1	3	1	2	1
Universalsejl, M	3	2	2	1	1	3	1	1	1*	1	1	3	1	2	1
Universalsejl, L	3	2	2	1	1	2	1	1	2*	1	1	3	1	2	1
Universalsejl, XL	3	3	3	2	2	2	1	1	2*	1	1	3	1	1	1
Liko Universalsejl m. ekstra løftehøjde, M	3	2	2	1	1	3	1	1	1*	3	3	3	3	3	3
Liko Universalsejl m. ekstra løftehøjde, L	3	3	2	1	1	3	1	1	2*	3	3	3	3	3	3

* Hovedstøtte varenr. 3651115 anbefales.

Forklaring: 1 = Anbefales, 2 = Acceptabel, 3 = Frarådes, 4 = Uegnet

Øvrige kombinationer

Andre kombinationer af tilbehør/produkter end de af Liko anbefalede, kan medføre en risiko for brugerens sikkerhed.

I de tilfælde hvor en anden producent anbefaler Likos tilbehør/produkter i kombination med producentens egne eller andres tilbehør/produkter, og hvor kombinationen ikke er godkendt af Liko, er den aktuelle producent ansvarlig for samtlige tilbehør/produkter i kombinationen. Liko henviser da til den ansvarlige producentens brugsanvisninger og anbefalinger, hvad angår anvendelse, vedligeholdelse, rengøring samt kontrol og eftersyn af Likos tilbehør/produkt for at garantere kravene iht. EN ISO 10535.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

